

LET'S GO! GUIDE



Ce guide vous aidera à vous familiariser rapidement avec votre M90, pour en profiter pleinement au quotidien. Veuillez consulter votre notice d'utilisation pour des instructions détaillées ou contacter votre revendeur local.



SUNRISE MEDICAL SE SOUCIE DE VOTRE SÉCURITÉ.
Veuillez lire votre notice d'utilisation pour obtenir des
instructions de sécurité et d'entretien.

CALIBRAGE DE VOTRE M90

Les roues M90 doivent être calibrées avant la première utilisation.

Le calibrage est nécessaire lors de la configuration initiale ou lors du remplacement du fauteuil. Le processus de calibrage définit les seuils de pente et de dénivelé de la M90 en fonction du fauteuil roulant, optimisant ainsi les performances pour l'utilisateur.

NOTE Le recalibrage des roues est la première étape de tout dépannage de la M90.

INSTRUCTIONS DE CALIBRAGE

AVANT DE COMMENCER, ASSUREZ-VOUS QUE...

- Les supports de fixation et les roues sont correctement installés.
- Les batteries sont complètement chargées.
- Les freins du fauteuil roulant sont enclenchés.
- Le fauteuil roulant se trouve sur une surface plane.
- Les roues sont en place et correctement verrouillées dans le support de fixation.

IMPORTANT: Ne déplacez pas le fauteuil pendant le calibrage.

1. Retirez la batterie de la roue M90.
2. Appuyez sur l'un des boutons de la roue et maintenez-le enfoncé tout en réinsérant la batterie.
3. Lorsque les voyants deviennent **ORANGE**, relâchez le bouton.
4. Attendez que les voyants passent au **BLANC**, puis **VERT**.
5. Lorsque les voyants sont **VERTS**, retirez et réinsérez la batterie. La roue émettra un bip.
6. Répétez les étapes 1 à 5 sur l'autre roue.
7. Retirez les roues, inversez-les et répétez les étapes 1 à 6.

NOTE Vous devrez effectuer la procédure de calibrage quatre fois au total, une fois pour chaque roue, en position gauche et droite.

ÉTAPE 3



ÉTAPE 5



ÉTAPE 7



MISE EN MARCHÉ/ARRÊT

Lorsque les batteries sont installées, les roues sont mises sous tension. Les roues recherchent automatiquement la commande via une connexion sans fil.

NOTE

Les boutons sur les roues de la M90 sont utilisées comme des indicateurs et pour le dépannage, et non comme des boutons marche/arrêt.

DEUX MODES DE CONDUITE

Votre motorisation M90 est livrée avec deux options de conduite:



SÉQUENTIEL PAR JOYSTICK
DIRECTION PAR
MAINS-COURANTES
Contrôle de la vitesse



PROPORTIONNEL PAR JOYSTICK
Direction et contrôle de la vitesse

CONNEXION DU BOÎTIER DE COMMANDE

IMPORTANT : Le boîtier de commande doit être fixé au support pour pouvoir utiliser la M90.

Appuyez une fois sur le bouton d'alimentation du boîtier de commande.

Le témoin d'alimentation LED (2) clignotera en blanc pendant la connexion. (Cela peut prendre jusqu'à 5 secondes)

Une fois connecté, un bip sonore retentira et l'indicateur d'alimentation (2) deviendra vert fixe.


Avec les roues activées, maintenez le joystick vers l'avant pour entrer en mode de conduite. Les deux roues se verrouilleront avec un clic, et le voyant d'état (3) deviendra vert lorsque le système sera prêt.

ALIMENTATION DE LA COMMANDE

APPUI RAPIDE POUR VERROUILLER OU DÉVERROUILLER

TÉMOIN LUMINEUX

1- INDICATEUR DE BATTERIE DE LA ROUE

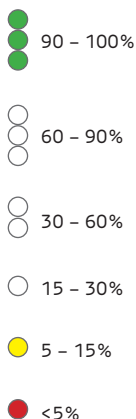

2

KLAXON

1

SOCLE/SABOT

BOUTON PROFILE / MODE

APPUI RAPIDE POUR CHANGER DE PROFIL
APPUI PROLONGÉ POUR CHANGER DE MODE DE CONDUITE

JOYSTICK

2- INDICATEUR ALIMENTATION COMMANDE

- CONNECTÉE, VERROUILLÉE
Clignotant = en attente de connexion
- COMMANDE ACTIVE
Charge = >15%
- CHARGE <15%
Clignotant = Charge <5%
- CHARGE FAIBLE
Ne peut pas être utilisée
- CHARGE
Clignotant = en charge

3- INDICATEUR D'ÉTAT

- MOYEURS DE ROUE NON ENGAGÉS
- MOYEURS DE ROUE ENGAGÉS
Clignotant = régulateur de vitesse engagé
- Protection thermique 1 –
Verrouillage en mode extérieur
- Protection thermique 2 –
Commande verrouillée. Freinage actif pour 5 secondes
- Protection thermique 3 –
Système verrouillé
- CHARGE
Clignotant = en charge

4- INDICATEUR DE PROFIL/ MODE DE CONDUITE

- MODE PROPORTIONNEL PAR JOYSTICK
Fixe = profil intérieur
Clignotant = profil extérieur
- MODE SEQUENTIEL AVEC DIRECTION PAR MAINS-COURANTES
Fixe = profil intérieur
Clignotant = profil extérieur

FONCTIONS	JOYSTICK PROPORTIONNEL	JOYSTICK BIDIRECTIONNEL avec DIRECTION PAR MAINS-COURANTES
MARCHE / ARRÊT	Poussez le joystick vers l'avant pour démarrer. Relâchez le joystick pour arrêter. Les mains-courantes n'influencent pas la vitesse.	Appuyez sur le joystick bidirectionnel pour démarrer. Poussez le joystick bidirectionnel vers le bas ou utilisez les mains-courantes pour s'arrêter progressivement.
CONTRÔLE DE LA VITESSE	Poussez le joystick vers l'avant ou vers l'arrière pour accélérer ou ralentir proportionnellement .	Appuyez sur le joystick bidirectionnel vers l'avant ou l'arrière pour augmenter ou diminuer la vitesse étape par étape, jusqu'au niveau 5 dans les deux profils.
DIRECTION	Déplacez le Joystick dans la direction désirée pour diriger.	Dirigez manuellement en utilisant les mains-courantes.
RÉGULATEUR DE VITESSE	Poussez le joystick vers l'avant jusqu'à atteindre la vitesse désirée, puis appuyez vers le bas pour activer. Dirigez en déplaçant le joystick vers la droite ou la gauche. Quittez en déplaçant le joystick vers l'avant ou l'arrière, ou en appuyant vers le bas.	Appuyez sur le joystick bidirectionnel vers l'avant ou l'arrière pour augmenter ou diminuer le niveau de vitesse. Dirigez manuellement avec les mains-courantes. Pour quitter, appuyez sur le joystick bidirectionnel vers le bas ou saisissez et maintenez les mains-courantes.
ASSISTANCE MANUELLE		Une impulsion douce s'active après un arrêt et vous permet de repositionner le fauteuil à l'aide des mains-courantes.
PROFIL DE CONDUITE Intérieur/extérieur	Sélectionnez un profil en utilisant l'application M90 ou le boîtier de commande.	Sélectionnez un profil en utilisant l'application M90 ou le boîtier de commande.
RÉGLAGE DE CONDUITE	Choisissez un type de conduite (Souple / Normal / Réactif) en utilisant l'application M90.	Choisissez un type de conduite (Souple / Normal / Réactif) en utilisant l'application M90.

CONSEILS POUR UNE CONDUITE EN TOUTE SÉCURITÉ

Commencez lentement. Des roulettes anti-bascule sont vivement conseillées lors de l'utilisation de la M90.


Commencez en mode intérieur dans un environnement sûr et ouvert. Entraînez-vous à vous arrêter à des points spécifiques, à tourner à l'arrêt et à tourner en mouvement.

PENTES

Commencez par une montée modérée avec une pente graduelle et une sortie dégagée, en évitant les virages immédiats en bas de la pente. La M90 assure le freinage et le contrôle de la descente.

Ajustez la position de votre corps pour maintenir l'équilibre et éviter de basculer – penchez-vous vers l'avant pour monter ou vers l'arrière pour descendre.

Assurez-vous que votre buste soit correctement soutenu, si nécessaire.

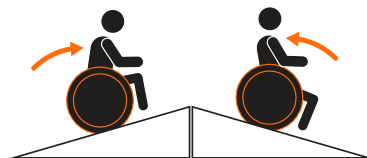

SCANNEZ POUR ACCÉDER AUX VIDÉOS D'INSTALLATION ET D'UTILISATION



Ou scannez pour consulter ce document dans d'autres langues.

Escanea para ver este documento en **ESPAÑOL**.

Scannez pour afficher ce document en **FRANÇAIS**.

Scannen, um dieses Dokument auf **DEUTSCH** angezeigt zu bekommen.

Inquadra qui per vedere il documento in **ITALIANO**.

Scan om dit document in het **NEDERLANDS** te bekijken.

www.SunriseMedical.fr/Empulse



Distribué par: Sunrise Medical
ZAC de la Vrillonnerie, 37170 Chambray-Lès-Tours
MK-I30227-EU Rev.D ©06.2026

