

# Kit de conversion Transit

## Inspections préalables à l'installation

### Inspections préalables à l'installation

Les inspections suivantes doivent être effectuées préalablement à l'installation du kit de conversion Transit, à défaut de quoi l'intégrité du fauteuil roulant pourrait être compromise pendant le transport et entraîner des blessures graves, voire mortelles. Corrigez tout problème ou anomalie, le cas échéant. S'il n'est pas possible de corriger le problème ou l'anomalie, n'installez pas le kit de conversion Transit.

1. Inspectez visuellement toutes les soudures sur le châssis afin de détecter la présence de fissures ou de fractures. Il ne doit y avoir visuellement aucune fissure. Dans les zones de soudure ou de pliage, éliminez les saletés éventuellement accumulées susceptibles de nuire à votre inspection.
2. Inspectez tous les éléments de fixation afin de vérifier qu'ils ne soient pas déformés, fendus ou desserrés. Resserrez les écrous, vis et boulons desserrés aux couples de serrage indiqués dans le manuel d'utilisation. Remplacez tout élément de fixation cassé, déformé ou rouillé.
3. Inspectez les roues arrière et avant, les fourches des roues avant et les essieux afin de détecter tout signe d'endommagement telles que des bosses, fissures dans le plastique ou autres déformations. Ces éléments ne doivent présenter visuellement aucun signe d'endommagement.
4. Inspectez la tubulure et les trous de fixation. La tubulure ne doit aucunement être bosselée, pliée ou déformée, de manière à compromettre la surface de montage. Les trous de fixation ne doivent présenter AUCUN signe de détérioration.